

Памятка пользователя

Ультрафонофорез с гелем Ферменкол в домашних условиях при помощи ультразвукового аппарата ФизиоФон

Фонофорез с гелем Ферменкол — эффективный метод введения активных компонентов на всю глубину рубцовой ткани.

Ультразвук повышает эластичность соединительной ткани, способствует разрыхлению коллагеновых волокон, благодаря чему повышается диффузия коллагенолитических ферментов в глубоко расположенные участки рубцовой ткани, что способствует редукции патологического коллагена.

Благодаря фонофорезу с гелем Ферменкол рубцы бледнеют, уменьшаются в размерах, становятся менее плотными и более эластичными, снижается или прекращается зуд, нормализуется гидратация рубцовой ткани. Успешный опыт применения фонофореза с гелем Ферменкол для коррекции гипертрофических и келоидных рубцов позволяет говорить о высокой эффективности данного метода.

Курс фонофореза с гелем Ферменкол:

10-15 процедур.

Интервал между курсами: 14 дней для взрослых, 30 дней для детей.

Продолжительность процедуры на одну область:

- 2-3 минуты для детей ■ 3-5 минут для взрослых
- 5-7 минут в области крупных суставов

Общая продолжительность процедуры


на нескольких областях не должна превышать:

- 10 минут у детей ■ 20 минут у взрослых

Интервал между процедурами: не более 2-х дней.

Следует соблюдать осторожность при воздействии на молодые (до 3-х) месяцев рубцы, так как действие ультразвука может спровоцировать их рост.

ВАЖНО! Не использовать аппарат в области сердца, во время беременности и детям до трех лет.

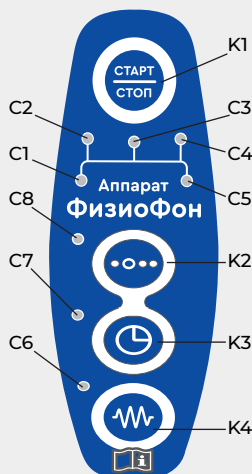

K1 — кнопка запуска / остановки процедуры;

K2 — кнопка выбора длительности импульса;

K3 — кнопка выбора и изменения параметра «ВРЕМЯ»;

K4 — кнопка выбора частоты работы аппарата
Частота 880 кГц - красный цвет.
Частота 2640 кГц - зеленый цвет.

C1-C5 — светодиодные индикаторы параметров времени и длительности импульса.

C6 — светодиодный индикатор выбранного режима работы;

C7 — светодиодный индикатор выбора параметра «ВРЕМЯ»;

C8 — светодиодный индикатор выбора длительности импульса.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ:

1. Предварительно очистить кожу, процедура может проводиться в положении сидя или лежа.
2. Подключить аппарат к сети, установить режим:
 - для тела и суставов – 880 кГц, глубина воздействия 4-6 см
 - для лица и тела – 2650 кГц, глубина воздействия 1-3 смИнтенсивность: 0,3 Вт/см² в непрерывном режиме.
3. Нанести на обрабатываемый участок кожи гель в необходимом количестве из расчета 0,5-1 г на 1 см² и нажать «Старт». Медленно, без усилий перемещать головку излучателя по проблемному участку поступательными

и круговыми движениями, сохраняя постоянный контакт с кожей. Между УЗ-насадкой и кожей не должно быть воздуха! Не допускать высыхания геля и добавлять его по мере необходимости.

4. Звуковой сигнал оповестит об истечении установленного времени процедуры. Отключить аппарат, снять сухой салфеткой остатки геля с излучателя и протереть спиртовой салфеткой.

ВАЖНО! Мощность излучения не должна превышать 0,4 Вт/см² во избежание инактивации фермента при нагревании УЗ-насадки.

ФЕРМЕНКОЛ®
ПРОТИВОРУБЦОВЫЙ ЭФФЕКТ



РФ, 191025, г. Санкт-Петербург,
вн. тер. г. МО Литейный округ,
ул. Маяковского, д. 36, лит. А

+7 (812) 327-54-47

+7 (931) 975-86-26