

Памятка пользователя

Ультрафонофорез с гелем Ферменкол в домашних условиях при помощи ультразвукового аппарата Ретон*

Фонофорез с гелем Ферменкол — эффективный метод введения активных компонентов на всю глубину рубцовой ткани.

Ультразвук низкой частоты повышает эластичность соединительной ткани, способствует разрыхлению коллагеновых волокон, благодаря чему повышается диффузия коллагенолитических ферментов в глубоко расположенные участки рубцовой ткани, что способствует редукции патологического коллагена.

Благодаря фонофорезу с Ферменколом рубцы бледнеют, уменьшаются в размерах, становятся менее плотными и более эластичными, снижается или прекращается зуд, нормализуется гидратация рубцовой ткани. Успешный опыт применения фонофореза с гелем Ферменколом для коррекции гипертрофических и келоидных рубцов позволяет говорить о высокой эффективности данного метода.

Следует соблюдать осторожность при воздействии на молодые (до 3-х месяцев) рубцы, так как действие ультразвука может спровоцировать их рост.

Курс фонофореза с гелем Ферменкол:

10-15 процедур.

Интервал между курсами: от 14 дней для взрослых, от 30 дней для детей.

Продолжительность процедуры на одну область:

- 2-3 минуты для детей
- 3-5 минут для взрослых
- 5-7 минут в области крупных суставов

Общая продолжительность процедуры на нескольких областях не должна превышать:

- 10 минут у детей
- 20 минут у взрослых

Интервал между процедурами: не более 2-х дней.



ВАЖНО! Не использовать аппарат в области сердца, во время беременности и детям до трех лет.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ:

1. Перед процедурой следует очистить кожу, для более глубокого проникновения активных веществ можно приложить горячую, но не обжигающую, салфетку.
2. Процедура может проводиться в положении сидя или лежа.
3. Нанести на рубцово-измененный участок кожи гель Ферменкол из расчета 0,1-0,2 г на 1 см² рубца и прижать головку излучателя, не допуская выдавливания геля.
4. Включить аппарат, зафиксировать время начала процедуры, и медленно, без усилий перемещать головку излучателя по проблемному участку поступательными и круговыми движениями, сохраняя постоянный контакт с кожей. Следить, чтобы гель Ферменкол не высыхал, добавляя его по мере необходимости.
5. По окончании процедуры отключить аппарат.

*Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкциями к набору гелей Ферменкол Элактин и ультразвуковому аппарату Ретон.

ФЕРМЕНКОЛ®
ПРОТИВОРУБЦОВЫЙ ЭФФЕКТ



РФ, 191025, г. Санкт-Петербург,
вн. тер. г. МО Литейный округ,
ул. Маяковского, д. 36, лит. А

+7 (812) 327-54-47

+7 (931) 975-86-26