

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SR-RU

628

аппарат ультрафонофореза



ВНИМАНИЕ

Благодарим вас за выбор нашей продукции. Для более комфортной эксплуатации оборудования, мы настоятельно рекомендуем:

- внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее;
- следуйте инструкции при установке и эксплуатации оборудования;
- не снимайте и не меняйте самостоятельно какие-либо детали оборудования;
- вскрывать и извлекать блок управления разрешено только уполномоченным сотрудникам фирмы-производителя;
- изменение и обслуживание оборудования разрешено только специалистами; в случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации, свяжитесь с нами

ВАЖНО: до начала эксплуатации оборудования, внимательно прочтите инструкцию и следуйте рекомендациям. Любые повреждения, которые возникли в следствии неправильного монтажа, приведут к аннулированию гарантии.

Данное оборудование не является медицинским. Пожалуйста, не используйте его для лечения каких-либо заболеваний!

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время ультразвуковое оборудование является самым популярным аппаратом для подтяжки, борьбы со старением и удаления морщин. Он может эффективно заменить основные программы ухода за лицом в салоне красоты, им можно легко, удобно и быстро управлять, и решать проблемы с кожей. Оборудование работает безопасно и эффективно и не требует травматизации кожи, инъекций, приема лекарств и хирургического вмешательства. Не имеет побочных эффектов, применяется наружно повсеместно и оказывает мгновенный эффект.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Ультразвуковое косметологическое оборудование устраняет проблемы с уходом за лицом.
2. Ультразвук усиливает проникновение, подтягивает и укрепляет кожу, а также способствует лучшему впитыванию кожей.
3. Аппарат имеет два наконечника, которые могут быть заменены в соответствии с различными требованиями.
4. Это безболезненно, неинвазивно и не приводит к травмам во время лечения. Не требует выздоровления, отсрочки и не повлияет на обычную работу и жизнь после процедур.
5. Подходит для всех типов кожи.
6. Неровностей, кровотоочивости и отеков не возникнет.

ПРИНЦИП РАБОТЫ УЛЬТРАЗВУКА

Используя принцип высокочастотной вибрации, ультразвуковое косметологическое оборудование, с высокочастотной вибрационной волной 1 МГц в секунду, может эффективно воздействовать на 4-6 миллиметров подкожной клетчатки.

Ультразвук обладает мощной энергией и сильной проникаемостью. Это заставляет клетки вибрировать вместе с ним, что может удалить жир из пор и изменить объем клеток, улучшая кровообращение и достигая целей стимулирования способности клеток к регенерации и придания коже блеска и эластичности. Кроме того, эффект тепла, создаваемый высокочастотной вибрацией, помогает косметическим питательным растворам глубже проникать в кожу и лучше усваиваться. Во время процедуры вокруг глаз, ультразвук быстро нагревает нижний слой кожи, стимулируя рост коллагена в коже для достижения эффекта подтяжки кожи вокруг глаз, устранения мешков и синяков под глазами, а также уменьшения красных кровянистых прожилок и тонких морщин.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Работает по типу постоянных и переменных УЗ волн.

Мощность: 30 Вт.

Частота ультразвуковой вибрации: 1МГц - 1.1МГц

Напряжение: АС 110-120 В/220-240 В, 50/60 Гц

Мощность ультразвука: 0-10W

Комплектация:

Главный аппарат - 1 шт.

Ультразвуковой наконечник для лица - 1 шт.

Ультразвуковой наконечник для глаз - 1 шт.

Шнур питания - 1 шт.

Эффективность:

1. Подтяжка кожи лица и глубокое питание.
2. Повышение эластичности и очищение кожи.
3. Увлажнение кожи и повышение ее впитываемости.
4. Ускорение кровообращения и обмена веществ.
5. Уменьшение двойного подбородка и укрепление кожи
6. Стимуляция гиперплазии коллагена и задержка старения.

Показания:

1. Лица с темными или тусклыми чертами.
2. Дряблая или обвисшая кожа.
3. Тонкие линии, носогубные складки или периорбитальные морщины.
4. Нечеткий контур лица.
5. Грубая кожа или большие поры.
6. Длительное воздействие ультрафиолетового излучения на рабочем месте.
7. Дряблая кожа или неровный тон кожи после родов.

Противопоказания:

1. Те, кто только что перенес пластическую операцию или были имплантированы протезы или металлические предметы внутри обработанных частей тела.
2. Те, кому недавно вводили гиалуроновую кислоту или водный свет или делали инъекцию для удаления морщин или пластической операции.
3. Те, у кого гипертония, болезни сердца, диабет, тяжелая форма щитовидной железы, злокачественные опухоли и т.д.
4. Лица в аллергическом периоде, с сильно чувствительной кожей или страдающие аллергией на металлы.
5. Лица с травмой кожи или раной.
6. Те, кто переживает переутомление.
7. Те, у кого менструация, беременность, лактация или хирургическое восстановление.
8. Те, у кого кожные заболевания или инфекционные заболевания.
9. Те, у кого нереалистичные иллюзии относительно эффекта.

Рекомендации после процедуры:

1. Не умывать лицо горячей водой в течение трех дней (умывайтесь теплой и холодной водой).
2. Продолжать увлажнять кожу и защищать себя от солнца.
3. Не пользоваться горячими источниками, саунами, не заниматься интенсивными физическими упражнениями и т.д. в течение трех дней.
4. Рекомендуется наносить маску для лица не реже трех раз в неделю
5. Избегайте употребления острой и жирной пищи, засиживания допоздна, курения и употребления алкоголя. Вместо этого ешьте больше овощей, фруктов и легкой пищи.
6. Не употребляйте пищу, вызывающую гипертонию, гиперлипидемию и гипергликемию, употребляйте в основном пресную пищу.

Эффективность:

1. Снимает усталость глаз, синяки и мешки под глазами, отеки.
2. Разглаживают периорбитальные морщины и "гусиные лапки".
3. Исчезают пигментные пятна и ускоряется кровообращение.
4. Ускоряет обмен веществ и предотвращает гиперпигментацию.
5. Обеспечивает питание глаз и увлажнение кожи.
6. Подтяжка кожи и уголков глаз.
7. Ускорение кровообращения в области вокруг глаз, эффективное впитывание питательных средств.

Показания:

1. Лица с морщинами, тонкими линиями, мешками под глазами или синяками под глазами.
2. Те, у кого сухая кожа, сухие линии или динамичные морщины.
3. Те, у кого глаза склонны к усталости или сухости.
4. Те, кто постоянно сидит за компьютером или мобильным телефоном.
5. Те, кто всегда поздно ложится спать или у кого синяки под глазами.
6. Те, кто постоянно подвергается воздействию сухой или высокотемпературной среды.

Противопоказания:

1. Тем, кто только что перенес пластическую операцию.
2. Лица с гипертонией, заболеваниями сердца, диабетом, тяжелой формой заболевания щитовидной железы, злокачественными опухолями и т.д.
3. Лица в аллергическом периоде, с сильно чувствительной кожей или страдающие аллергией на металлы.
4. Лица с травмой кожи.
5. Лица пожилого возраста.
6. Беременные или выздоравливающие после хирургического вмешательства.
7. Страдающие кожными заболеваниями или инфекционными заболеваниями.

Рекомендации после процедуры:

1. Избегайте нахождения под палящим солнцем и защищайте себя от него.
2. Продолжайте увлажнять кожу и защищайте себя от солнца, так как обработанные участки относительно сухие.
3. Лучше не использовать такие продукты, как спирт, АНА (альфа-гидроксильная кислота) или скраб-крем в течение 1-3 дней.
4. Избегайте мытья лица горячей водой, посещения горячих источников, саун или интенсивных физических упражнений в течение семи дней.
5. Пейте больше воды и наносите маску для глаз, которую следует делать не реже трех раз в неделю.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- (1) Необходимо использовать вилку с заземляющим контактом и уже заземленную электрическую розетку. Перед использованием оборудования необходимо убедиться в том, что оно заземлено.
- (2) Убедитесь, что напряжение оборудования является адаптивным. Если местный источник питания напряжение нестабильно, мы рекомендуем пользователям добавить регулятор напряжения с согласованным питанием между электросетью и оборудованием.
- (3) Чтобы гарантировать лечебный эффект оборудования и нормальный срок службы, пожалуйста, всегда используйте указанные детали, предоставленные или предложенные оригинальным производителем.
- (4) Оборудование нельзя размещать во влажных местах или вблизи воды, а также на него не должны попадать прямые солнечные лучи.
- (5) Пожалуйста, не размещайте оборудование вблизи источников сильного нагрева, поскольку это может повлиять на срок его службы и повседневное использование.
- (6) Пожалуйста, удалите все металлические предметы с тела перед использованием, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, которые могут повлиять на лечебный эффект.
- (7) Пожалуйста, воздержитесь от использования устройства, нацеленного на глазные яблоки, щитовидную железу, парашитовидные железы, и яички.
- (8) Лицам, страдающим каким-либо заболеванием, следует использовать его с осторожностью, если они не получают разрешения врача.
- (9) Пожалуйста, выключите питание оборудования, если им никто не пользуется, и убедитесь, что основное питание отключено после того, как все будет улажено.
Таким образом, безопасность оборудования может быть гарантирована.
- (10) Оборудование должно тщательно контактировать с кожей, чтобы избежать неравномерного распределения энергии при в процессе использования.
- (11) При запуске начинайте с самого низкого энергетического уровня и постепенно повышайте его после того, как клиент привыкнет к этому.
- (12) При использовании данного оборудования обрабатываемые детали должны оставаться влажными, а кожа - сухой.
- (13) После операции очистите оборудование обычным физиологическим раствором, чтобы обеспечить его чистоту и гигиеничность и продлить срок его службы.
- (14) Используйте оборудование и обучайте операторов в строгом соответствии с инструкциями, указанными в руководстве..

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК И РЕШЕНИЯ

(1) Не удается запустить оборудование?

- А. Убедитесь, что шнур питания подключен к подходящей розетке.
- В. Проверьте, не ослаблен ли предохранитель на задней панели или не перегорел.

(2) Производительность оборудования снижена?

- А. Пожалуйста, проверьте, плотно ли соединены наконечник и штекер, подключаемый к оборудованию корпус.
- В. Проверьте, используются ли в наконечнике адаптивные продукты, потому что неправильное использование может привести к плохому контакту и снижению мощности

Антивозрастной уход за лицом: 60 минут/ раз в неделю

Рекомендуемое время фонофореза: 15 минут


Рекомендуемый режим: Непрерывный режим вывода

Манипула: выберите манипулу для лица

Рекомендуемый уровень энергии: от 1 до 5

Расходные материалы: средство для демакияжа, тоник, очищающее средство, питательный гель для проведения процедуры, завершающая маска.

1. Снимите макияж и очистите лицо, 5 минут.
2. Нанесите тоник, выдержите 1 минуту.
3. Равномерно нанесите питательный гель на лицо.
4. Запустите аппарат, установите время, выберете соответствующую манипулу и уровень энергии.
5. Проработайте манипулой все лицо три раза. Массажные схемы представлены на картинках ниже:

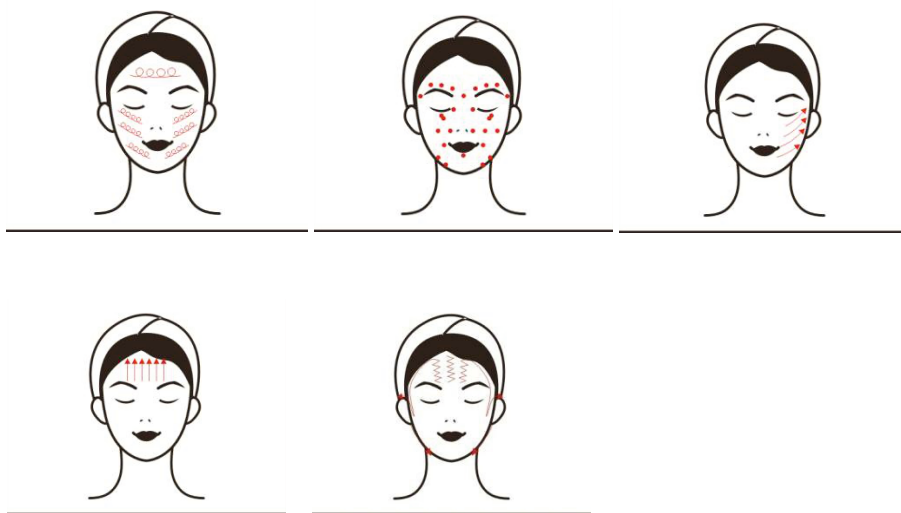

6. Очистите лицо, 2 минуты.
7. Нанесите маску для лица и подождите 15 минут.
8. Очищайте лицо в течение 2 минут.
9. Нанесите тоник, эссенцию, крем для лица и солнцезащитный крем.
10. Процедура окончена

Рекомендуемый курс лечения:

Курс лечения включает в себя десять приемов. После одноразовой процедуры кожа становится подтянутой и омолаженной, а также получает необходимое питание. Через один прием кожа подтягивается и приобретает блеск. После двух курсов кожа становится гладкой, упругой, а ее контуры становятся четче. После трех курсов улучшается обмен веществ в коже и вывод токсинов. И это помогает выцветанию пигмента и осветлению темной кожи, предотвращает и задерживает старение, дряблость и дряблость кожи, а также стимулирует гиперплазию коллагена в нижележащей коже, делая ее нежной, гладкой, упругой и блестящей.

Уход за кожей вокруг глаз: 45 минут/ 2-3 раза в неделю

Рекомендуемое время фонофореза: 15 минут

Рекомендуемый режим: Непрерывный режим вывода

Манипула: выберите манипулу для области вокруг глаз

Рекомендуемый уровень энергии: от 1 до 5

Расходные материалы: средство для демакияжа, тоник, очищающее средство, эссенция/гель для проведения процедуры, завершающая маска.

1. Снимите макияж и очистите лицо, 5 минут.
2. Нанесите тоник, выдержите 1 минуту.
3. Равномерно нанесите эссенцию/гель для век, распределите круговыми движениями.
4. Запустите аппарат, установите время, выберете соответствующую манипулу и уровень энергии.
5. Проработайте манипулой область вокруг глаз три раза. Массажные схемы представлены на картинках ниже:



6. Очистите лицо, 2 минуты.
7. Нанесите маску для лица и подождите 15 минут.
8. Очистите лицо в течение 2 минут.
9. Нанесите тоник, эссенцию, крем для лица и солнцезащитный крем.
10. Процедура окончена

Рекомендуемый курс лечения:

Рекомендуется делать 2-3 раза в неделю. После одноразовой процедуры кожа вокруг глаз будет подтянута, а кровообращение ускорится. Через месяц мелкие морщинки и синяки под глазами исчезнут, а цвет кожи улучшится. Через три месяца глаза станут подтянутыми, помолодевшими. С помощью процедуры можно поддерживать свежий вид кожи вокруг глаз и замедлить процесс старения.

ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Лица, оказавшиеся в следующих ситуациях, должны использовать оборудование с осторожностью. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом или профессионалом перед использованием. Ниже приведены сведения:

- (1) Женщины в период беременности или кормления грудью.
- (2) Лица с заболеваниями сердца или с кардиостимуляторами.
- (3) Лица с незаживающими хирургическими ранами или находящиеся на этапе хирургического восстановления.
- (4) Пациенты с эпилепсией, тяжелым диабетом или гипертиреозом.
- (5) Пациенты со злокачественными опухолями, гемофилией или сильными кровотечениями.
- (6) Людям с кожными заболеваниями или инфекционными заболеваниями следует использовать с осторожностью.
- (7) Тем, кто чувствителен к ультразвуку, следует использовать его с осторожностью.
- (8) Тем, кто только что перенес пластическую операцию и находится на излечении, запрещено использовать оборудование.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

(1) Вопрос: Сколько времени требуется, чтобы увидеть эффект?

Ответ: Обычно эффект можно увидеть в тот же день или в течение недели после лечения. Коллагеновая ткань кожи при нагревании сокращается, что приводит к очевидному подтягиванию кожи. Ультразвук может непрерывно вырабатывать коллаген, поскольку он стимулирует подкожную клетчатку. Поэтому, чем больше вы его используете, тем лучше эффект.

(2) Вопрос: Вреден ли ультразвук для кожи?

Ответ: Ультразвук для подтяжки и разглаживания морщин - это нехирургическая программа. Он стимулирует регенерацию коллагена в коже и ускоряет обмен веществ. Таким образом, он не наносит вреда коже. После процедуры возникнет только локальное покраснение и жжение, обычное явление, вызванное ускоренным кровообращением, которое через мгновение исчезнет.

(3) Вопрос: Какие функции включает в себя это оборудование?

Ответ: процедура омолаживает кожу и делает ее гладкой, убирает мелкие морщинки и синяки под глазами, уменьшает морщины, дряблость, а также борется с признаками старения.

(4) Вопрос: Есть ли у него какие-либо побочные эффекты на лице?

Ответ: Улучшение внешнего вида и борьба со старением с помощью ультразвука - это неинвазивное лечение, которое в настоящее время является одним из самых безопасных и эффективных способов удаления морщин, подтяжки и подтягивания кожи. Вообще говоря, побочных эффектов нет. У некоторых людей может наблюдаться временное покраснение или припухлость, которые исчезнут через несколько часов. Люди с сухой кожей могут испытывать сухость и атрофию после первоначальной обработки. Кожа будет терять влагу из-за нагрева оборудования. Эти симптомы исчезнут через три дня. Таким образом, никаких побочных эффектов на лице нет.

**ЖЕЛАЕМ ВАМ
ПРЕКРАСНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ!**